

## HURTIG-REFERENCE

# Worklist & PACS overførsel

Opret patient i RIS → opret opgave → tag billede i CS Imaging 8 → send til PACS

**DEL 1** Opret patient i DenTecs RIS

- 1 Åbn **DenTecs RIS** i browseren  
Patientlisten vises automatisk
- 2 Klik **+ Add New Patient** → udfyld navn, CPR, fødselsdato og køn → **Create Patient**
- 3 Søg patienten frem via efternavn → **Search**

Bemærk: Store og små bogstaver skal matche — skriv navnet præcis som ved oprettelsen

- 4 Klik på patienten → åbn profil → klik **+ Create Task**

**DEL 2** Opret opgave (worklist-post)

- 5 Verificér patientoplysninger → **Verify**
- 6 Udfyld procedure: beskrivelse (fx *Panorama røntgen*), accessionsnummer → **Next**
- 7 Angiv dato, tid, modalitet og AE-titel → **Next**
- 8 Tilføj evt. lægenavn → **Submit**  
Opgaven oprettes og vises i CS Imaging 8's worklist

**DEL 3** Tag billede i CS Imaging 8

- 9 Åbn **CS Imaging 8** fra skrivebordet → klik **WORKLIST** → klik på patienten → tag billedet  
Patient og procedure hentes automatisk fra jeres RIS

**DEL 4** Overfør billede til PACS

- 10 Højreklik på billedet → **DICOM Transfer**
- 11 Vælg **DCM4CHEE** → **For Presentation** → **Start transfer**  
Billedet er nu arkiveret på PACS-serveren

